

Care-foot Socks

Produktbeschreibung

Wenn ein Patient Fußschmerzen hat, ist es schwierig, den Fuß in eine beliebige Richtung zu beugen, was die Flexibilität des Fußes beeinträchtigt. Daher ist es notwendig sicherzustellen, dass die TENS-Elektrode korrekt positioniert wird. Die Care-foot Socks verwenden leitfähige Silberfasern zur Stimulation des Fußes – dies ist eine wirksame Alternative. Die Verwendung der Care-foot Socks erleichtert es Patienten, die diese Flexibilität nicht besitzen, den Fuß zu positionieren.

Präsentation

Sie sind dafür ausgelegt, Elektroden einfach an schmerzenden Stellen des Fußes zu platzieren. Patienten können sie einfach um den Fuß anlegen.

Verwendung zu Hause, bei der Arbeit oder unterwegs

Die tragbaren Care-foot Socks ermöglichen eine direkte, gezielte Fußtherapie, sodass Patienten Schmerzen reduzieren und zu einem aktiven Lebensstil zurückkehren können.

Gebrauchsanweisung

1. Die Haut muss stets sauber, feucht und frei von Lotion sein.
2. Stecken Sie ein Ende des Kabels in die Metallschnappverschlüsse, um die Care-foot Socks mit dem selbstklebenden Elektrodenpad zu verbinden, und das andere Ende mit dem Elektrodenpad. Stellen Sie sicher, dass die Verbindung korrekt hergestellt ist, um eine gute Leistung zu gewährleisten. Bitte beachten Sie die Abbildung rechts.
3. Stellen Sie sicher, dass die Care-foot Socks optimal um den Fuß positioniert sind. Das selbstklebende Elektrodenpad sollte sich in einem Abstand von 40 mm zu den Care-foot Socks befinden.
4. Vergewissern Sie sich, dass das TENS-Gerät ausgeschaltet ist. Schließen Sie den Kabelstecker an das TENS-Gerät an. Schalten Sie das TENS-Gerät nach dem Anschließen ein.
5. Wenn Sie die Anwendung beenden möchten, schalten Sie zunächst das TENS-Gerät aus. Entfernen Sie dann den Stecker und die Care-foot Socks.

Der verwendete Bereich muss feucht gehalten werden.

△ Sicherheitshinweise

- Wenn Sie während der Behandlung Unwohlsein oder Unregelmäßigkeiten verspüren, beenden Sie die Anwendung sofort und konsultieren Sie einen Arzt.
- Nicht auf beschädigter Haut anwenden. Wenn ein Brennen der Haut auftritt, beenden Sie die Anwendung sofort und kontaktieren Sie Ihren Arzt.
- Wenn die Elektrodenpads beschädigt sind, nicht verwenden.
- Stellen Sie den Stimulator gemäß den Geräte- und/oder Arztanweisungen für Ihre Behandlung ein. Zu Ihrer Sicherheit und für Ihren Komfort schalten Sie den Stimulator aus, bevor Sie versuchen, die Care-foot Socks zu entfernen.
- Die unbeaufsichtigte Verwendung durch Kinder oder handlungsunfähige Personen kann gefährlich sein.
- Wenn manche Personen Hautreizungen durch die leitfähigen Silberfasern der Care-foot Socks verspüren, stellen Sie die Verwendung der Care-foot Socks ein.

Reinigung und Pflege

Waschen Sie das Produkt zur Reinigung in warmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel anstelle von heißem Wasser. Entfernen Sie alle Rückstände der Waschlösung gründlich in warmem Wasser. Nicht wringen. Wickeln Sie es in ein Frotteetuch. Verwenden Sie ein Handtuch, um überschüssiges Wasser zu entfernen. Entfernen Sie das Handtuch und lassen Sie es bei Raumtemperatur an der Luft trocknen. Von Wärmequellen und Sonnenlicht fernhalten.

Hersteller:

Shenzhen Roundwhale Technology Co., Ltd.

Adresse: 202, 2/F, Gebäude 27, Dafa Industrial Park, Longxi Community, Longgang Street, Longgang District, Shenzhen, China

Tel.: +86-755-23212776 | Fax: +86-755-23212776

E-Mail: info@roovjoy.com | Website: www.roovjoy.com

EU-Bevollmächtigter (EC REP):

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Adresse: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Deutschland

E-Mail: shholding@hotmail.com

CE-gekennzeichnetes Produkt